

## 東ソーコントロール (ACTH)

\*\* 本品は、Eテスト「TOSOH」®II (ACTH) 免疫反応試薬及びAIA-パックCL® ACTH 反応試薬に専用のコントロールで、精度管理に用います。

## 【本質】

1. 本品はACTH及び蛋白質をベースとした凍結乾燥品で、次の2種類のACTHコントロールからなっています。  
東ソーコントロール (ACTH) レベル1  
東ソーコントロール (ACTH) レベル2
- \*\*2. ACTHコントロールの表示濃度は社内標準品を基準として、Eテスト「TOSOH」II (ACTH) 免疫反応試薬及びAIA-パックCL ACTH 反応試薬を用いてそれぞれ決めたものです。その値はpg/mLを単位として、箱、びんのラベルに記載されています。本品の表示濃度範囲は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

## 【使用方法】

1. 本品は凍結乾燥品ですので、それぞれ精製水1.0 mLを加え、ゴム栓を閉めて、十分に転倒混和して完全に溶解してから使用してください。
- \*\*2. 本品は、装置の取扱説明書及び試薬の添付文書に従って、測定してください。

## 【使用上の注意】

1. 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
3. 冷蔵庫から出して使用する際には15~25℃に戻してから使用してください。
4. 開封後あるいは調製後の本品は密封して2~8℃保存した場合7日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合もありますので、できるだけ早くご使用ください。
5. 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
6. 本品は人由来成分を含んでおりませんので、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体は陰性ですが、被検検体の場合と同様に取扱いには注意してください。本品や検体の付着したピペットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ (例えば121℃、20分以上) などで滅菌後廃棄してください。

## 【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 2~8℃保存
2. 有効期間 12ヶ月  
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

## 【包装単位】

品番	品名	包装
0025421	東ソーコントロール (ACTH)	レベル1、2: 各1.0 mL用×2本

\*\* 「Eテスト「TOSOH」」及び「AIA-パックCL」は東ソー株式会社の登録商標です。

## 【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部  
カスタマーサポートセンター  
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1  
フリーダイヤル® 0120-17-1200  
TEL. (0467) 76-5384  
FAX. (0467) 79-2550

## 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都港区芝3-8-2

TEL. (03)5427-5181

FAX. (03)5427-5220

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町2番地



**TOSOH CORPORATION**  
Shiba-koen First Bldg.  
3-8-2, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-8623, Japan  
Phone: +81 3 5427 5181  
Fax: +81 3 5427 5220



**TOSOH EUROPE N.V.**  
Transportstraat 4  
B-3980 Tessenderlo, Belgium  
Phone: +32 13 66 88 30  
Fax: +32 13 66 47 49



**TOSOH BIOSCIENCE, INC.**  
6000 Shoreline Ct., Suite 101  
South San Francisco, CA94080, USA  
Phone: +1 650 615 4970  
Fax: +1 650 615 0415

 European Conformity	 In vitro diagnostic medical device	 Consult instructions for use
 Temperature limitation	 Use by date	 Batch code / Lot number
 Manufacturer	 Authorized representative in the European Community	 Catalogue number / Part number
 Supplied by	 Net volume (after reconstitution for lyophilized material)	

## 東ソーコントロール(ACTH) 参考値表

ロット番号:DY4A678

使用期限:2024-10-31

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

### 測定方法

#### 1) Eテスト「TOSOH」® II

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
ACTH	pg/mL	40~60	240~360

#### 2) AIAーパックCL®

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
ACTH	pg/mL	45~68	280~420