

注意) 日本語による記載部分は日本国内での使用を保証する内容となっておりますので、日本国外での使用の際は使用する国の取扱説明書に従ってください。

東ソーコントロール（C-ペプチド）

** 本品は、Eテスト「TOSOH」®II（C-ペプチドII）及びAIA-バックCL® C-ペプチドに専用のコントロールで、精度管理に用います。

【本質】

- 本品はC-ペプチド及び蛋白質を含む凍結乾燥品で、次の2種類のコントロールからなっています。
東ソーコントロール（C-ペプチド）レベル1
東ソーコントロール（C-ペプチド）レベル2
- C-ペプチドコントロールの表示濃度は社内標準品を基準として、Eテスト「TOSOH」®II（C-ペプチドII）及びAIA-バックCL C-ペプチドを用いてそれぞれ決めたものです。その値はng/mLを単位として、びんのラベルに記載されています。本品の表示濃度範囲は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

【使用方法】

- 本品は凍結乾燥品ですので、それぞれ精製水2.0 mLを加え、ゴム栓を閉めて、十分に転倒混和して完全に溶解してから使用してください。
- 本品は、包装の取扱説明書及び試薬の電子添文に従って測定してください。

【使用上の注意】

- 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
- 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 冷蔵庫から出して使用する際には15～25℃に戻してから使用してください。
- 開封後あるいは調製後の本品は密封して2～8℃保存した場合14日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合がありますので、できるだけ早くご使用ください。
- 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
- 本品はHBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体が陰性であることが確認されていますが、被検検体の場合と同様に取扱いには注意してください。本品や検体の付着したビベットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ（例えば121℃、20分以上）などで滅菌後廃棄してください。
- 本品は溶解後、希釈しないでご使用ください。

【貯蔵方法・有効期間】

- 貯蔵方法 2～8℃保存
- 有効期間 12ヶ月
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

【包装単位】

品番	品名	包装
0025484	東ソーコントロール（C-ペプチド）	レベル1、2： 各2.0 mL用×2本

“Eテスト「TOSOH」”及び“AIA-バックCL”は東ソー株式会社の登録商標です。

【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
カスタマーサポートセンター
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
フリーダイヤル® 0120-17-1200
TEL. (0467) 76-5384
FAX. (0467) 79-2550

**【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都中央区八重洲2-2-1

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町2番地

東ソーコントロール(C-ペプチド) 参考値表

ロット番号:EY45699

使用期限:2025-10-31

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法

1) Eテスト「TOSOH」® II

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
C-ペプチド II	ng/mL	1.6~2.4	17~26

2) AIA-パックCL®

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
C-ペプチド	ng/mL	1.6~2.4	15~23