

## 東ソーコントロール（シスタチン C）

\*\* 本品は、E テスト「TOSOH」II（シスタチン C）に専用の試薬で、精度管理に用います。

## 【本質】

1. 本品はシスタチン C 及び蛋白質溶液をベースとした液体で、次の 2 種類のシスタチン C コントロールからなっています。  
東ソーコントロール（シスタチン C）レベル 1  
東ソーコントロール（シスタチン C）レベル 2
- \*\* 2. シスタチン C コントロールの表示濃度は社内標準品を基準として決めたものです。その値は mg/L を単位として、びんのラベルに記載されています。本品の表示濃度範囲は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

## 【使用方法】

1. 本品は液体ですので、開封後そのまま使用してください。
- \*\* 2. 本品は、装置の取扱説明書及び試薬の電子添文に従って測定してください。

## 【使用上の注意】

1. 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
3. 冷蔵庫から出して使用する際には 15 ～ 25 °C に戻してから使用してください。
4. 開封後の本品は密封して 2 ～ 8 °C 保存した場合 7 日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合もありますので、できるだけ早く使用してください。
5. 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
6. 本品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。また、アジ化ナトリウムは鉛管・銅管と反応して爆発性のある金属アジドを生成することがありますので、測定終了後の液を廃棄する際には大量の水とともに薄めて廃棄してください。
7. 本品は HBs 抗原、HIV 抗体及び HCV 抗体が陰性であることが確認されていますが、被検検体の場合と同様に取扱いは注意してください。本品や検体の付着したピペットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ（例えば 121 °C、20 分以上）などで滅菌後廃棄してください。
8. 本品は希釈しないで、そのまま使用してください。（コントロールの表示濃度は、25 倍希釈にて測定された検体の濃度に相当します。）

## 【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 2 ～ 8 °C 保存
2. 有効期間 12 ヶ月  
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

## 【包装単位】

| 品番      | 品名                 | 包装                            |
|---------|--------------------|-------------------------------|
| 0025417 | 東ソーコントロール（シスタチン C） | レベル 1、2：<br>各 4.0 mL 入り × 2 本 |

## 【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部  
カスタマーサポートセンター  
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2743-1  
フリーダイヤル® 0120-17-1200  
TEL. (0467) 76-5384  
FAX. (0467) 79-2550

\*\* 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都中央区八重洲 2-2-1

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町 2 番地



**TOSOH CORPORATION**  
2-2-1 Yaesu, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0028 Japan  
Phone: +81 3 6636 3734  
Fax : +81 3 6636 3627

EC REP

**TOSOH EUROPE N.V.**  
Transportstraat 4, 3980  
Tessenderlo, Belgium  
Phone: +32 13 66 88 30  
Fax : +32 13 66 47 49

UK RP

**TOSOH BIOSCIENCE LIMITED**  
Lyttchett House, 13 Freeland Park,  
Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA UK  
Phone: +44 1527 592901  
Fax : +44 1527 471680



In vitro diagnostic  
medical device



Consult instructions for use



Batch code / Lot number



Temperature limitation



Use-by date



Catalogue number  
/ Part number



Manufacturer

EC REP

Authorised representative  
in the European Community



Net volume  
(after reconstitution  
for lyophilized material)

UK RP

UK Responsible person



United Kingdom  
Conformity Assessed



A carrier containing unique  
device identifier information

## 東ソーコントロール(シスタチン C) 参考値表

ロット番号:F34A274

使用期限:2026-03

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

### 測定方法

#### E テスト「TOSOH」® II

| 測定項目    | 単位   | レベル1<br>参考値 | レベル2<br>参考値 |
|---------|------|-------------|-------------|
| シスタチン C | mg/L | 0.034~0.051 | 0.13~0.20   |